



COVID-19

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques « GRAND PUBLIC » catégorie 1
exclusivement réservés à des usages non sanitaires,
Suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 22 juillet 2020

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 1

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : → 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air → 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-3236/DGA MNRBC/2000305/NP - 01/05/2020) et qui supporte 60 lavages (rapport RP/20 -7000/DGA MNRBC/2000305/NP - 29/06/2020)

Masque testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Matières principales fabriquées en France

Assemblage Euro Med

Cycle du produit vertueux

Composition :

Couche 1 : Interlock 100% Polyester

Couche 2 : Maille bouclette intérieure 100% Polyester


Couche 3 : Tissu 100% Coton lavé

Elastiques* : 43% Polyester- 57% Elasthane

* la composition des élastiques peut varier



EXISTE EN 3 TAILLES :
S, M et L

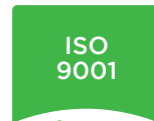

BCS Certification

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Matières premières principales
certifiées OEKO-TEX STANDARD 100
Fabricant Français B69DARD

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



